

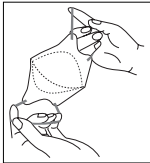


Partikelmaske FFP2

- **Schützt vor flüssigen und festen Aerosolen**
- **95% Filtrationseffizienz**
- **Flüssigkeitsbeständig**
- **Flexible Ohrenschlaufen**
- **Bequemes Material**

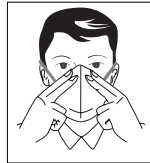

Die Maske vor das Gesicht halten und die Gummibänder über die Ohren ziehen.

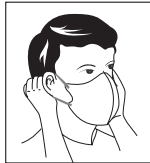

Den Nasenclip um die Nase herum in die richtige Form drücken und den unteren Rand der Maske vollständig über das Kinn ziehen.

Aufbewahrung:

Ausschließlich in der Originalverpackung kühl und trocken lagern (relative Luftfeuchtigkeit < 80%, Temperatur zwischen -1°C und +30°C).

Entsorgungshinweis:

Beachten Sie die regionalen Bestimmungen zur Entsorgung der Masken. Nicht achtlos wegwerfen.

Sicherheitshinweise:

- Nichteinhalten der Sicherheitshinweise oder Beachten der richtigen Passform kann zu Gesundheitsschäden oder Tod führen.
- Holen Sie sich Beratung von einem qualifizierten Sicherheitsexperten, bevor Sie die Maske verwenden.
- Die Maske liefert keinen Sauerstoff. Nur in ausreichend belüfteten Bereichen verwenden.
Nicht in Umgebungen mit einer Sauerstoffkonzentration von weniger als 19,5% verwenden.
- Nicht verwenden bei Schadstoffkonzentrationen, die unmittelbar gesundheits- oder lebensgefährlich sind.
- Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
- Nicht verwenden bei erhöhtem Atemwiderstand, Verunreinigung oder Beschädigung.
- Gesichtsbehaarung, Bärte und bestimmte Gesichtsmarkmalen können die Wirksamkeit dieser Maske beeinträchtigen.
- Berühren Sie nie die Maskeninnenseite.
- Nicht wiederverwendbar.
- Nicht waschbar.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung und erfüllt die Anforderungen der europäischen Norm EN149: 2001 + A1: 2009.
Kein medizinisches Produkt.